

# AED(メトロニック)操作方法



## 1. ふたを開ける (自動的に電源が入ります)

以降はAEDの音声ガイドに従って操作を行います。



## 3. 患者から離れる

心電図の解析中、患者から離れるように指示。AEDの充電が完了したら安全を確認する。  
私⇒あなた⇒周りの人




## 2. パッドの図に従い、 電極パッドを装着




パッドを貼る間も対処を続けます。

●チェックポイント  
【通電に障害があるもの】  
○汗や水で濡れていないか ⇒ 拭き取る

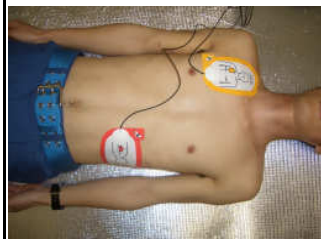


○貼り薬などはないか ⇒ はがして薬を拭き取ります

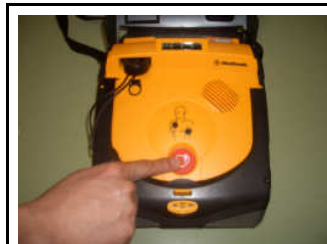

## 4. ショックボタンを押す

救急隊が到着するまでAED対処を続ける。

- 救急隊へ伝達すること
  - 患者さんが倒れた時の情報
    - 倒れるところを見たか、倒れる音を聞いたか？
    - 何をしていたか？
    - 倒れる前に変わった様子は無かったか？
  - 電気ショックを行った回数
  - 胸骨圧迫(心臓マッサージ)を開始した時刻
  - 電気ショックを行った時刻
  - あなたのお名前
  - 救急講習受講の有無と受講コース

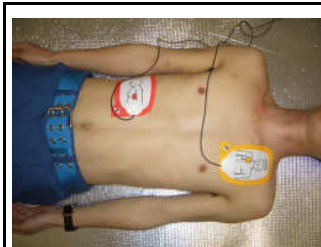

※ペースメーカーが埋め込まれている場合は位置が逆さになります。ペースメーカーから離れた位置に貼ってください。