

AED(FR2)操作方法



1. 電源を入れる。

以降はAEDの音声ガイドに従って操作を行います。



2. パッドの図に従い、電極パッドを装着




パッドを貼る間も対処を続けます。


●チェックポイント
【通電に障害があるもの】
○汗や水で濡れていないか ⇒ 拭き取る



○貼り薬などはないか ⇒ はがして薬を拭き取ります

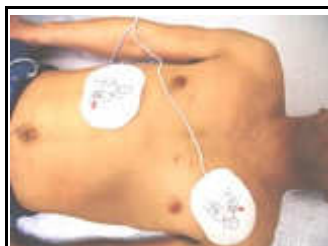


※ペースメーカーが埋め込まれている場合は位置が逆さになります。ペースメーカーから離れた位置に貼ってください。

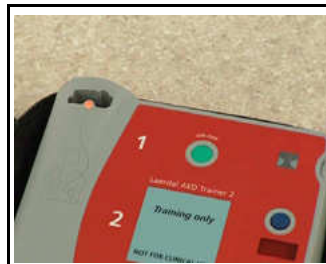

3. コネクタを接続 ※最初からつながっているものもあります。



心電図の解析中、患者から離れるように指示。
AEDの充電が完了したら安全を確認する。
私⇒あなた⇒周りの人

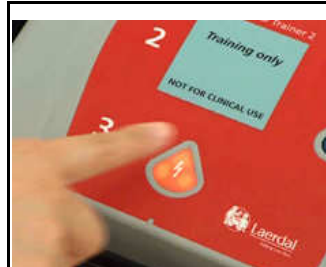

4. ショックボタンを押す

救急隊が到着するまでAED対処を続ける。

- 救急隊へ伝達すること
 - 患者さんが倒れた時の情報
 - 倒れるところを見たか、倒れる音を聞いたか？
 - 何をしていたか？
 - 倒れる前に変わった様子は無かったか？
 - 電気ショックを行った回数
 - 胸骨圧迫(心臓マッサージ)を開始した時刻
 - 電気ショックを行った時刻
 - あなたのお名前
 - 救急講習受講の有無と受講コース